

ROHO® QUADTRO SELECT®



Sittdyna med mycket god tryckavlastning och ett individuellt anpassat sittstöd.

ROHO QUADTRO SELECT är tryckavlastande och positionerande på samma gång. Dynan är uppdelad i fyra kammare med luftkanaler emellan. På så sätt pumpas hela dynan upp via en ventil. För att låsa eller reglera en inställning använder man ISOFLO-ventilen på dynans framsida. Då stänger/öppnar man kanalerna mellan de fyra luftkammarna.

ROHO QUADTRO SELECT bygger på ROHO Dry Floatation teknologin och har väl dokumenterade egenskaper för behandling och förebyggning av trycksår. Dynan underlättar bäckenkorrigering och ökar bålstaibiliteten samtidigt som brukaren får en dyna med mycket god tryckavlastning. Dynan levereras med ett töjbart avtagbart luftgenomsläppligt överdrag. Inkontinensöverdrag finns som tillbehör.




ROHO QUADTRO SELECT högprofil rekommenderas till brukare som har eller löper stor risk att utveckla trycksår.



ROHO QUADTRO SELECT lågprofil rekommenderas till brukare i förebyggande syfte.

Storlek	Art.nr Högprofil	Art.nr Lågprofil
31,0 x 30,0 cm	34QS66C	34QS66LPC
31,0 x 34,5 cm	34QS67C	34QS67LPC
35,5 x 34,5 cm	34QS77C	34QS77LPC
35,5 x 38,5 cm	34QS78C	34QS78LPC
35,5 x 43,0 cm	34QS79C	34QS79LPC
39,5 x 34,5 cm	34QS87C	34QS87LPC
39,5 x 38,5 cm	34QS88C	34QS88LPC
39,5 x 43,0 cm	34QS89C	34QS89LPC
39,5 x 47,0 cm	34QS810C	34QS810LPC
44,0 x 38,5 cm	34QS98C	34QS98LPC
44,0 x 43,0 cm	34QS99C	34QS99LPC
44,0 x 47,0 cm	34QS910C	34QS910LPC
44,0 x 51,5 cm	34QS911C	34QS911LPC

Storlek	Art.nr Högprofil	Art.nr Lågprofil
48,5 x 38,5 cm	34QS108C	34QS108LPC
48,5 x 43,0 cm	34QS109C	34QS109LPC
48,5 x 47,0 cm	34QS1010C	34QS1010LPC
48,5 x 51,5 cm	34QS1011C	34QS1011LPC
52,5 x 43,0 cm	34QS119C	34QS119LPC
52,5 x 47,0 cm	34QS1110C	34QS1110LPC
52,5 x 51,5 cm	34QS1111C	34QS1111LPC
57,0 x 47,0 cm	34QS1210C	
57,0 x 51,5 cm	34QS1211C	
57,0 x 47,0 cm	34QS1212C	
61,0 x 47,0 cm	34QS1310C	
61,0 x 51,5 cm	34QS1311C	

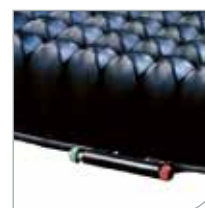

ISOFLO-ventilen gör det enkelt att ställa in dynan. Ventilen är stängd när den röda knappen är intryckt.