

# Handy vägghandtag

**etac**<sup>®</sup>

Handy är ett funktionellt och väldesignat stöd som passar in i alla miljöer. Handtaget är speciellt framtaget för att skapa trygghet och vara en hjälpande hand vid toalett- och badrumsbesök.



# Handy

– ett stabilt vägghandtag med många användningsområden

Handy ger trygghet och stabilitet vid toalett- och badrumsbesök. Det är designat för att passa in i alla miljöer och materialen är framtagna för att minimera risken att halka.

## Ett säkert grepp


- Den dolda skruvfästningen och den ergonomiska utformningen ger en trygg och behaglig känsla
- Den aluminiumförstärkta konstruktionen gör att Handy tål mycket stora belastningar, upp till 160 kg

## Genomtänkt materialval

- Handys inlägg av mjukt antihalkmaterial ger ett säkert grepp

## 4 olika storlekar

- Handy finns i olika längder, både raka och vinklade, för att passa alla behov

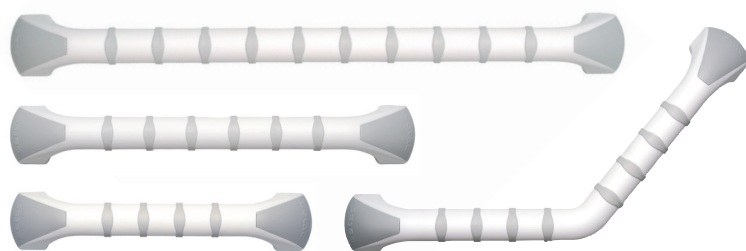

Handy vägghandtag, rak

Handy vägghandtag, vinklad



Handy ger en hjälpande hand i många olika situationer.

### Produkt

Handy, rak, 60 cm  
Handy, rak, 40 cm  
Handy, rak, 30 cm  
Handy, vinklad, 40 cm

### Artikelnr

80210044  
80210042  
80210040  
80210046



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.

Producerad av  
Gordon Ellis.

## Limma vägghandtag i badrum. Slipp vattenskador!


Alla fastighetsbolag vill minska håltagning i badrum. **Etac** och **EB Solution** har lösningen så du slipper borra i kakel när du sätter upp vägghandtaget Handy från Etac.

En adapter, som består av en rostfri platta med gängade hål limmas först upp på kaklet. Sedan skruvar du fast handtaget i plattan med de korta skruvarna.

Vi rekommenderar inte att limma på kakel som är av äldre datum utan att först ha kontrollerat att kakel och fogmassa är av god kvalitet. Diskutera med fastighetsägaren innan om du är osäker.

När du vill ta bort handtaget så "sågar" du genom limfogen med en pianotråd, och tar sedan bort limresterna med en rakbladsskrapa. Klart! Inga hål efter vägghandtaget.

Limmet har mycket god hållfasthet. Vi använder två miljövänliga lim, Cascos SuperFix eller Loctite 5616.

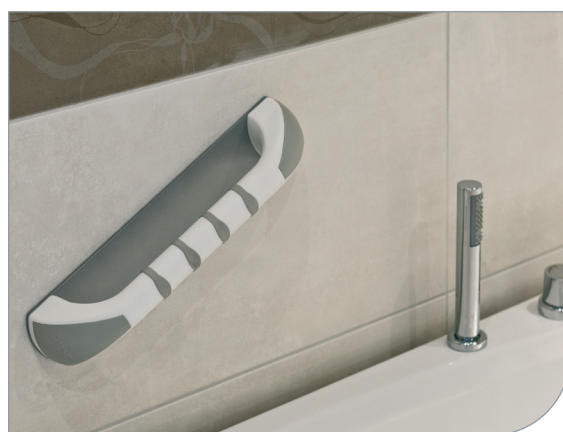

Handtag med förmonterad adapter beställs från EB Solution.

För mer teknisk information kontakta EB Solution  
Friggagatan 29, 441 51 Alingsås, Telefon 0322-66 50 15  
Mobil 0705-81 81 50, urban@ebsolution.se

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se www.etac.se



**etac**<sup>®</sup>

Skapar möjligheter