


Lille Viking 2000

Uppgradering

1. Teleskopstaget med avfasad tapp (UB200076A), som tidigare fästes i låsklotsen (UB200082C), ersätts med en ny teleskopstång (1) med urfräst spår.

När denna teleskopstång monterats i tvärstaget så att vinkelspaken går ner i spåret kan den inte glida ur tvärstaget eller försvinna in i densamma.


2. Låsklotsen ersätts så att det sitterlikadana fästörön (UB200078) på bägge sidor (2). Fördelen med detta är att beslagen kan vändas antingen med infästningshålet uppåt eller neråt och gör det även lättare att montera dom likadant på både höger och vänster sida.

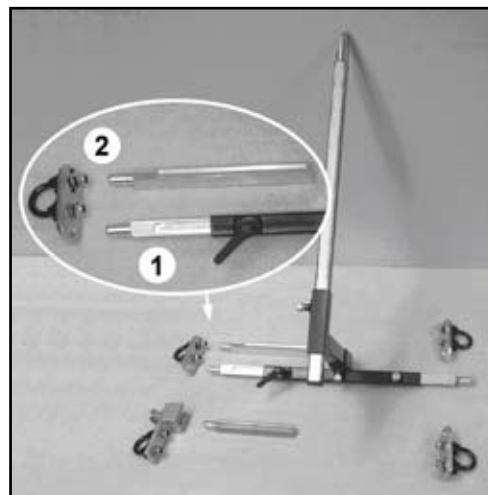

3. Chassit till lille Viking (UB200218) ändras från att ha varit ihopsatt av flera delar med skruvförband tillatt i stället vara gjort i ett stycke och ihopsvetsat (3).

4. Det nya chassit eloxeras vilket gör det mindre korrosionsbenäget och samtidigt ger det en hårdare och mera slitstark yta (4).

5. Samtidigt ändras vinkeln på monteringsbygel (UB200037) så att det blir bättre plats för kontakten till Manöverboxen. Infästningen mellan Chassit och monteringsbygel får samtidigt 4 skruvar i stället för 2 vilket gör det mera stabilt (5).

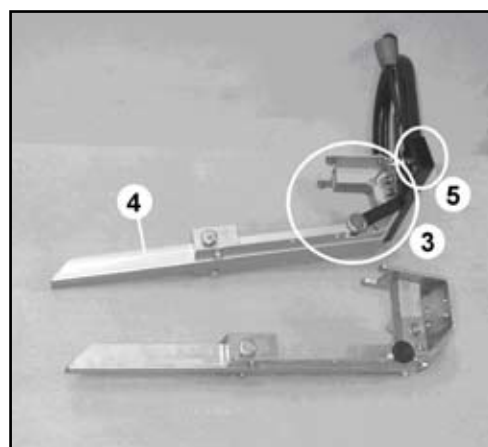

Vi kommer dessutom att som ersättning av den hittills använda laddaren Lindmark 24 V / 3 Amp (UB2183), att övergå till laddare Mascot 2410, 24 V / 2,5 Amp (UB2183). Denna laddare är ett gott ersättningsalternativ och är godkänd att använda till Medicintekniska Produkter.

Dessa ändringar/förbättringar kommer från önskemål från våra kunder i Sverige och Norge.