

Tvättråd ROHO madrasser Dry Floatation

Handtvätt

1. Släpp ut luften och stäng samtliga luftventiler innan tvätt.
2. Duscha i kallt vatten.
3. Tvätta med diskmedel och ljummet vatten.

Alternativt

Maskintvätt

1. Lägg dynan/madrassen i ett örngott/tvättpåse.
Använd flytande tvättmedel utan blekmedel.

2. Max 60°C i 10 min

OBS! Får ej centrifugeras eller torktumlas

Desinfektion

Punktdesinfektion:

1. Bearbeta ytan flödigt med ett desinfektionsmedel *
(ex Ytdesinfektion Plus)

Hela produkten:

2. Tvätta flödigt med ett desinfektionsmedel*
(ex Virkon, Perasafe...)
3. Skölj noga

ROHO utfyllnadssektion

Handtvätt

Tvätta med trasa. Använd milt diskmedel och ljummet vatten.

Desinfektion

Bearbeta ytan flödigt med ett desinfektionsmedel *

ROHO madrassöverdrag

Maskintvätt

60° C med ett kulör tvättmedel. Torktumla eller dropptorka.

Får ej kemtvättas.

Desinfektion

Blötlägg i desinfektionslösning, skölj noga.

* Välj medel enligt lokala anvisningar

