

# Tvättfakta madrasser Lück

## Generell information

- Följ instruktionerna på rengöringsmedlen
- Kontrollera de lokala tvättrutinerna med hygiensjuksköterska

## Madrasskärna av kallskum

- Används hygienöverdrag är rengöring av själva madrasskärnan sällan nödvändig
- Om madrassen trots allt behöver rengöras rekommenderar vi följande tillvägagångssätt:
  - Avtorkning med alkoholbaserade desinfektionsmedel, ej klorbaserade medel
  - Använd inte vatten
  - Autoklivering 125°

## Hygienöverdrag

### (Märkta med tvättrådsetikett, PVC-fria)

- Fläckar av blod, urin, avföring mm ska först bearbetas med kallt vatten
- Maskintvätt 95° C, centrifugering och torktumling 100° C
- Avtorkning med alkoholbaserade desinfektionsmedel, ej klorbaserade medel

## Jerseyöverdrag Prevent

### (Märkt med tvättrådsetikett)

- Fläckar av blod, urin, avföring m.m. ska först bearbetas med kallt vatten
- Maskintvätt 60° C, centrifugering och torktumling 100°C