

# Tvättråd ROHO sittdynor Dry Floatation

## Handtvätt

1. Släpp ut luften och stäng samtliga luftventiler innan tvätt.
2. Duscha i kallt vatten.
3. Tvätta med diskmedel och ljummet vatten.

## Alternativt

## Maskintvätt

1. Lägg dynan/madrassen i ett örngott/tvättpåse.  
Använd flytande tvättmedel utan blekmedel.
  2. Max 60°C i 10 min
- OBS! Får ej centrifugeras eller torktumlas



## Desinfektion

### Punktdesinfektion:

1. Bearbeta ytan flödigt med ett desinfektionsmedel \*  
(ex Ytdesinfektion Plus)

### Hela produkten:

2. Tvätta flödigt med ett desinfektionsmedel\*  
(ex Virkon, Perasafe...)
3. Skölj noga

## ROHO överdrag

## Maskintvätt

60° C med ett kulör tvättmedel. Torktumla eller dropptorka.

Får ej kemtvättas.

## Desinfektion

Blötlägg i desinfektionslösning\*, skölj noga.

\* Välj medel enligt lokala anvisningar